

Guía Rápida de instalación del interruptor de emergencia ES-400 e interruptor de presencia PB-500

Cómo conectar la consola de cama JNS-4CS, con un interruptor de emergencia ES-400, y un interruptor de presencia PB-500

Paso 1

Preparación del material

- JNS-4CS
- ES-400
- PB-500
- Pinzas de corte
- Cinta aislante

ES-400



JNS-4CS



ES-400 PB-500



Nipper




Friction Tape

COMMAX

Paso 2

Conexión de cables.

Conecta el conector 3-Pin al CN5 en el JNS-4CS.

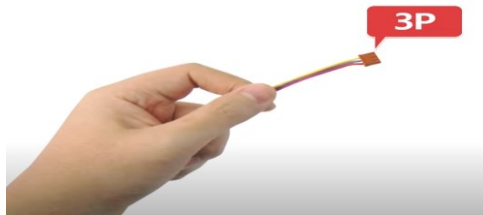


COMMAX


Paso 3

Conexión de cables.

Conecta el cable rojo y el cable azul al ES-400 y al PB-500 para conectarse con el JNS-4CS.

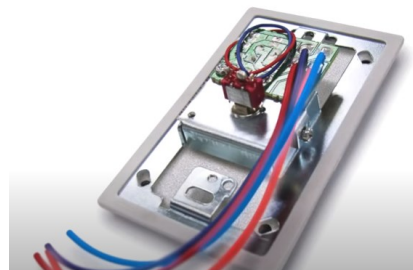

NOTA: Se usarán los cables ubicados a la derecha


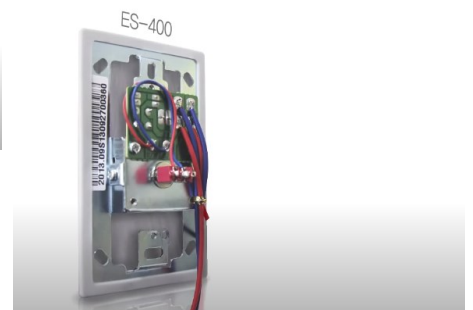


COMMAX

Paso 4

Conexión de cables.

Conecta el cable rojo al ES-400 y al PB-500 del conector 3-Pin del CN6 en el JNS-4CS

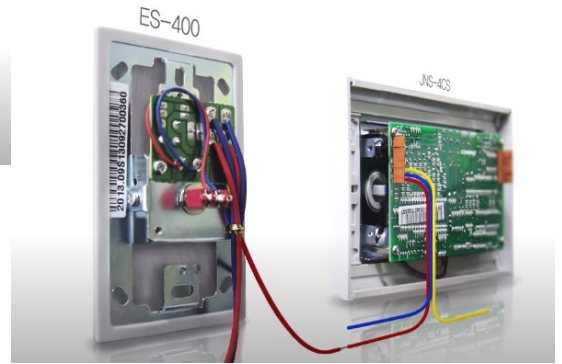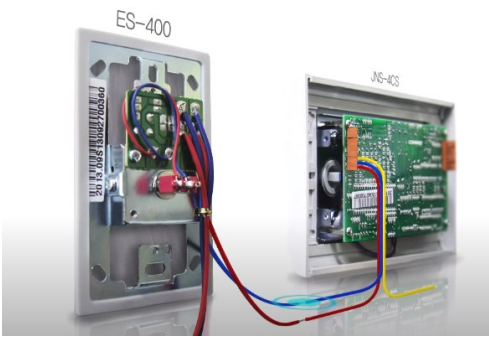


COMMAX

Paso 5

Conexión de cables.

Conecta el cable azul del ES-400 hacia el cable azul del conector 3-Pin del CN6 en el JNS-4CS

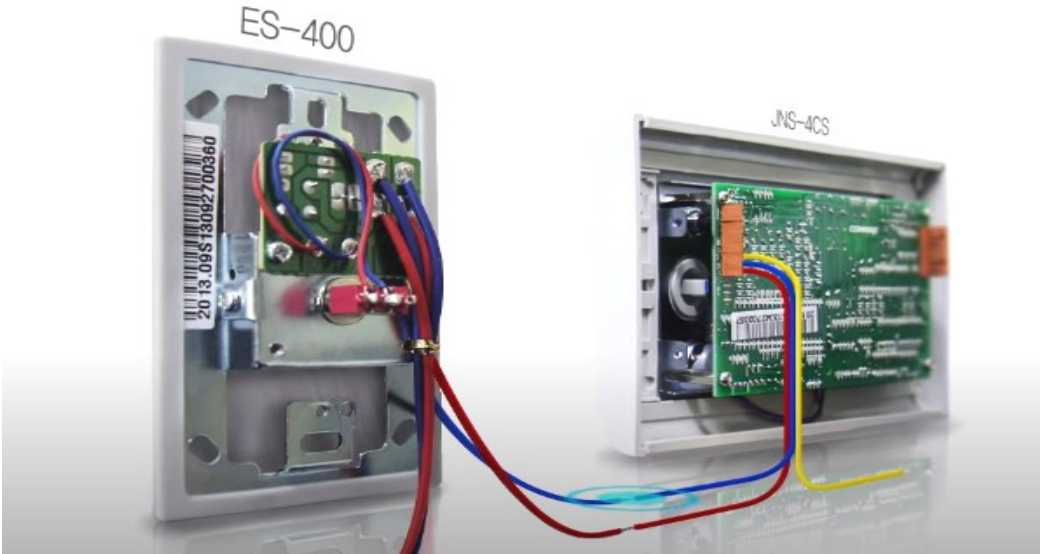


COMMAX

Paso 6

Conexión de cables.

Conecta el cable azul del PB-500 hacia el cable amarillo del conector 3-Pin del CN6 en el JNS-4CS

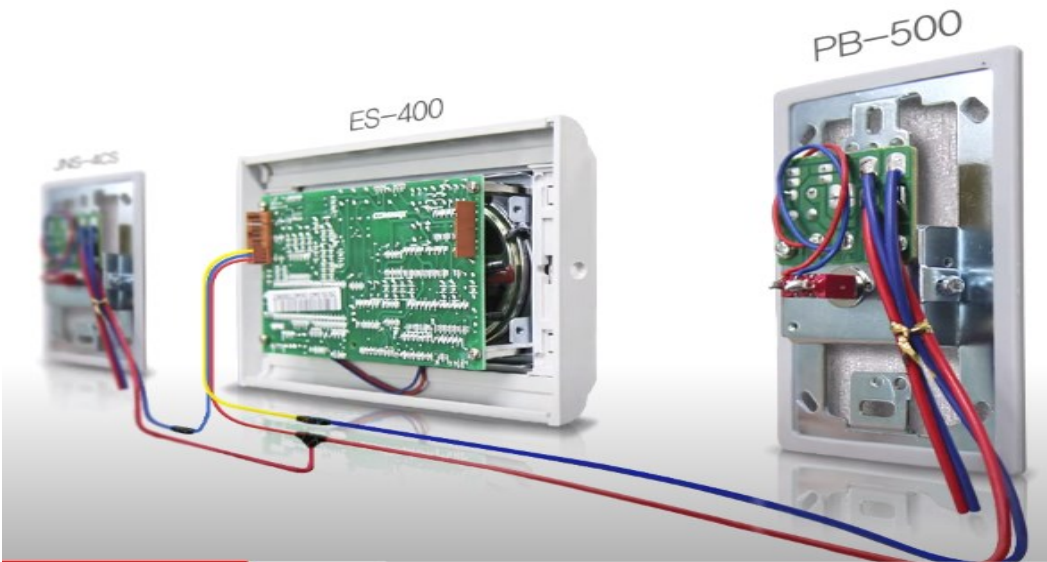

COMMAX

Paso 7

Completado

La conexión del ES-400 y el PB-500 con el JNS-4CS está completa.



COMMAX

Paso 8

Confirmar luces y pantalla.

Confirma que la luz verde en el ES-400 encienda y la luz verde en el CL-302C está parpadeando.



- Al activar el interruptor ES-10 se encenderá la luz de corredor CL-302I en color rojo.



- Se recibe alerta en unidad de enfermería JNS-70MN

COMMAX

Paso 9

Apagar llamada de emergencia.

Para apagar la alarma de emergencia, presione el botón en PB-500 para apagar la lámpara de presencia y presione el botón de búsqueda en ES-400 para apagar la llamada.

