

Manual de usuario del producto

JNS-4CS



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Gracias por comprar productos COMMAX.
- Lea atentamente esta Guía del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usar un producto exactamente.
- La empresa no se hace responsable de ningún accidente de seguridad causado por un funcionamiento anormal del producto.



1. Cómo utilizar el producto

- Unidad de consulta de enfermería / cama
- Este producto funciona junto con la unidad principal. (JNS-4CM / PSM)
- Este producto notifica a JNS-4CM de llamadas, conversaciones y emergencias.
- Cuando presiona el botón de llamada, la lámpara de llamada (verde o blanca) se enciende y suena la melodía de llamada.

Si la otra persona (enfermeras) responde, puede hablar.

- Puede realizar llamadas usando el CC-200 y hacer llamadas de emergencia usando el ES-400,410,420.
- Si hay una enfermera en la habitación del paciente, puede mostrársela a otra persona (enfermeras) a través del PB-500.
- El CL-302I informa el estado de la habitación del paciente, como llamadas, llamadas de emergencia, enfermeras en la habitación y llamadas del personal.

COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Departamento de Negocios

Internacionales de Corea: Tel .; + 82-31-7393-540 ~ 550 Fax .; + 82-31-745-2133 Sitio web:

www.commax.com