




Quando el hospitalizado genera una alarma desde el pulsador o el botón rojo incorporado en el módulo de tres botones:



- 1 La enfermera recibe la llamada en el puesto de control. Establece comunicación con la habitación para conocer el origen de la incidencia.



- 4 La enfermera va a la habitación y se identifica usando el tarjetero incorporado en el modulo de tres botones.

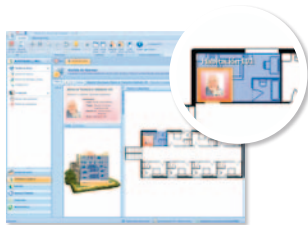

- 2 En el software se marca en rojo la zona que está en alarma.



- 3 La luz de pasillo de la habitación enciende la luz roja fija.



- 5 La luz de pasillo indica la presencia de la enfermera iluminando la luz verde.

**En caso de ser necesario y ante una urgencia, la enfermera puede solicitar:**



- 1 La ayuda de otra enfermera, pulsando sobre el botón rojo del módulo de tres botones. En ese caso:



- 2 Se realiza una llamada al puesto de control para que acuda otra enfermera a la habitación en cuestión. Se abre canal de voz con la habitación.



- 3 En el software se marca en rojo la zona que está en alarma. El texto de la alarma indica que una enfermera ha solicitado ayuda.



- 4 En la luz de pasillo de la habitación se iluminan la luz verde y parpadea la luz roja.



- 5 Dejará de parpadear la luz roja cuando la nueva enfermera se identifique mediante el paso de la tarjeta cerca del módulo de tres botones.



- 1 La ayuda de un médico, pulsando sobre el botón azul del módulo de tres botones. En ese caso:



- 2 Se realiza una llamada al puesto de control. En la pantalla se indica que se ha solicitado la presencia de un médico.



- 3 En el software se marca en rojo la zona que está en alarma. El texto de la alarma indica que una enfermera ha solicitado ayuda a un médico.



- 4 En la luz de pasillo se ilumina el botón verde y el resto de luces parpadean rápidamente.



- 5 En la luz de pasillo, se quedaran las luces verde y azul fijas, cuando el médico pase su tarjeta cerca del módulo de tres botones.



- ⑥ Una vez que se ha resuelto la urgencia y la enfermera y/o el médico van a abandonar la habitación deben pasar previamente la tarjeta cerca del módulo de tres botones.



- ⑦ Se apaga la luz verde cuando todas las enfermeras abandonan la habitación.



- ⑧ Se apaga la luz azul cuando todos los médicos abandonan la habitación.



**En caso de que la alarma se genere desde el tirador del baño:**



- ① La parte roja y blanca de la luz de pasillo se iluminan fijas.




- ② Tanto en el software como en la pantalla del puesto de control, se indica el origen de la alarma.



- ③ En caso de que una enfermera se encuentre en el baño y necesite solicitar ayuda, podrá pedirla accionando el tirador de baño. La luz de pasillo encenderá la luz blanca y verde fija y la roja parpadeará.

## Resumen sobre el funcionamiento de las luces de pasillo:

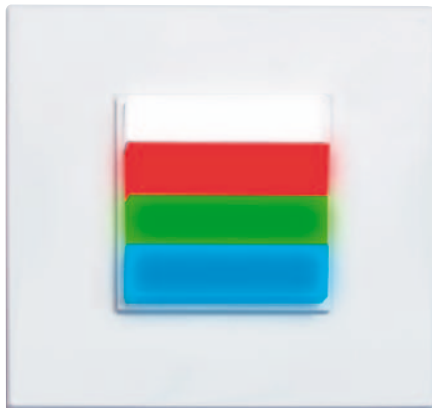

Luz verde iluminada fija indica la presencia de enfermera en la habitación.

Luz azul iluminada fija indica la presencia de médico en la habitación.

Luz roja iluminada fija indica alarma:

- Si la luz blanca esta fija indica que la alarma se ha generado desde el tirador de baño.

Luz roja parpadeando indica alarma de urgencia:

- Si la luz blanca esta fija indica que la alarma se ha generado desde el tirador de baño.
- Si parpadean el resto de luces rápidamente indica que se ha solicitado la ayuda de un médico.

## Recuerde:

Tanto la enfermera como el médico se identifican pasando la tarjeta por el módulo de tres botones. Deben pasar la tarjeta tanto a la entrada como a la salida.

En el software y en el puesto de control, los textos indican el origen de la alarma.

